

SACHOL[®] Aftigel

Wyrób medyczny

Łagodzi bolesne objawy, sprzyja odnowie nabłonka.

I tubka o pojemności 12 ml

Wskazania:

Wyrób

medyczny

Wyrób medyczny przydatny w leczeniu aft, aftowego zapalenia jamy ustnej i mikrozmiarów w jamie ustnej wywołanych na przykład przez stałe lub ruchome protezy bądź aparaty ortodontyczne. Dzięki skuteczności naturalnych standaryzowanych ekstraktów wyrób ten tworzy ochronną warstwę przykrywającą mikrozranienia i ogranicza bolesne objawy oraz pieczenie. Ponadto sprzyja on procesowi odnowy nabłonka.

Skład:

Ksylogluklan (*Tamarindus indica*), heterozydy (*Centella asiatica*), polisacharydy (*Aloe vera*), wyciąg z *Zanthoxylum bungeanum*, witamina E, karboksymetylobeta-glukan, gliceryna roślinna, woda, maltodekstryna, poliwinylpirolidon, karboksymetyloceluloza, naturalny aromat miętowy, etoksylogowany uwodorniony olej rycynowy, kwas cytrynowy, sorbinian potasu, benzoesian sodu, sól sodowa EDTA, sukraloza, aspartam, acesulfam K.

Dawkowanie

i

sposób

podawania:

Nanieść jedną lub dwie krople żelu, aby przykryć całą zmianę, unikając bezpośredniego kontaktu z aplikatorem. Jeśli zmiana jest trudno dostępna, nanieść żel czystym palcem lub gazą. Należy unikać dotykania językiem naniesionego produktu przez co najmniej 2 minuty, aby mógł on utworzyć ochronną warstwę i jak najdłużej utrzymać się na zmianie. Po każdym użyciu należy nałożyć zakrętkę. Stosować 3 lub 4 razy na dobę lub częściej, zależnie od potrzeb.

Ostrzeżenia:

- Nie stosować w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
- Po każdym użyciu należy nałożyć zakrętkę.
- Nie stosować tego produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować, jeśli opakowanie jest naruszone.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła.



Labomar Srl Via N. Sauro 35 Istrana (TV)

Dystrybutor: Valeant Sp. z o.o. sp.j..

Wersja: luty 2015 r.

CE 0373